

松风 Eyespecial C-IV 口腔专业摄影装置



口腔专用 操作简单，便捷高效



EyeSpecial C-IV

“口腔专用”
专属定制

“初次使用”
轻松掌握

“图片整理”
有条不紊

加载新功能更胜一筹！



Eyespecial C-IV

功能加载，更胜一筹



新功能 加载“视频模式”

增加了长达 10 分钟的视频模式



手术操作
技术记录



培训员工
教育工具

功能提升 处理能力 & 触屏功能

操作反应与启动速度提升
使用更舒适



舒适化操作

• 视频模式



* 本相机显示屏仅用于图片确认，若想查询更精细的图像请使用电脑显示器。

• 与以前型号产品相比，液晶显示屏色彩再现性能提升



偏光模式 专为观察表面及内部结构设计

需要安装松风偏光滤镜（单独销售）*1



在偏光镜辅助摄影状态下（借助新开发的交叉偏振光滤镜 - 松风单独销售），可以拍出牙面没有反光的照片，能够更清晰地观察牙齿内部精细结构。
*1 需要安装“松风偏光滤镜”并选择偏光摄影模式。



医患沟通
简洁明了



修复治疗
收集资料



检查诊断
辅助手段

• 摄影效果对比



微距放大模式拍摄



偏光模式拍摄

* 本相机显示屏仅用于图片确认，若想查询更精细的图像请使用电脑显示器。

目标： 口腔摄影专业化、简洁化



3 大特点



“口腔专用” 专属定制

专用产品，关注细节
功能满载，满足需求



“初次使用” 轻松掌握

拒绝复杂设置
大多数人都能轻松掌握的
简单摄影方式



“图像整理” 有条不紊

内置软件，向 PC 传输数据时，可自
动分置不同患者信息文件夹，缩短繁
琐的图像整理工作

POINT
1


“口腔专用” 专属定制

机身便捷设计，治疗中也能轻松拍摄

便于取景取景的设计

在有限的诊疗时间内，能尽快完成拍摄区域的取景。

- 液晶显示画面的中心与镜头中心一致

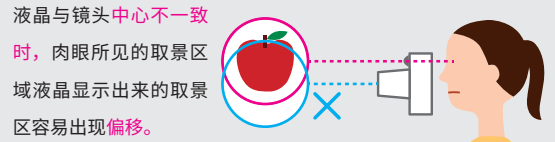

- 加载了便于确定取景定位的瞄准参考线


不惧淋湿，具有防水性（IPX4 标准）

被水等淋湿也能够放心使用的相机。

可单手完成拍摄

在比色或插入反光镜时，单手握持相机即可轻松完成拍摄。

- 便于单手握持的机身设计；
- 重量轻，体积小（重量 590g，与 500ml 饮料易拉罐重量相当）

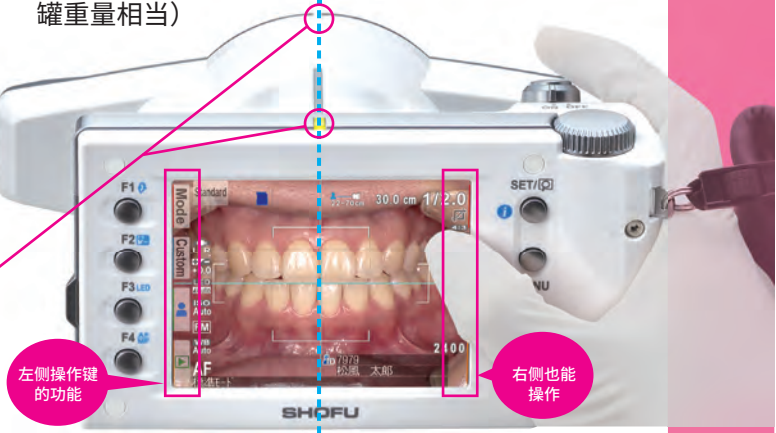

- 仅用右手即可完成画面操作 **NEW!**
触摸与左侧各功能键相对应的右侧空间，也能启动同样的操作内容。
* 仅限于画面右侧彩色框区内触摸操作

与诊疗场景相匹配的摄影模式

NEW!

视频动画模式



能灵活应用于手术记录，
作为员工教育工具

NEW!

功能强化，拍摄更简单
能对应被照体选择内侧闪
光灯以及外侧灯拍摄，避
免阴影产生

8 种静止画面拍摄模式



标准模式
常规的口腔内拍摄

镜像模式
使用反光板拍摄时
(可进行图像的反转)

比色板模式 (色彩抽出)
生成一枚普通照片和一枚将牙
齿以外区域灰化处理的照片

手术模式
可在远离口腔的位置拍摄



微距放大模式
用于放大照片的拍摄



美白模式
美白前后对照的拍摄模式



低反射模式
抑制牙面反光的拍摄模式



肖像模式
面部、半身照的基础上，增加
了全身模式的拍摄

NEW!


POINT
2

“初次使用” 轻松掌握

具有自动修片功能

对准拍摄
尤为便利

选择摄影倍率，参考推荐位置，拍摄位置在标准位置前后略有差异也能得到相同尺寸的图像。

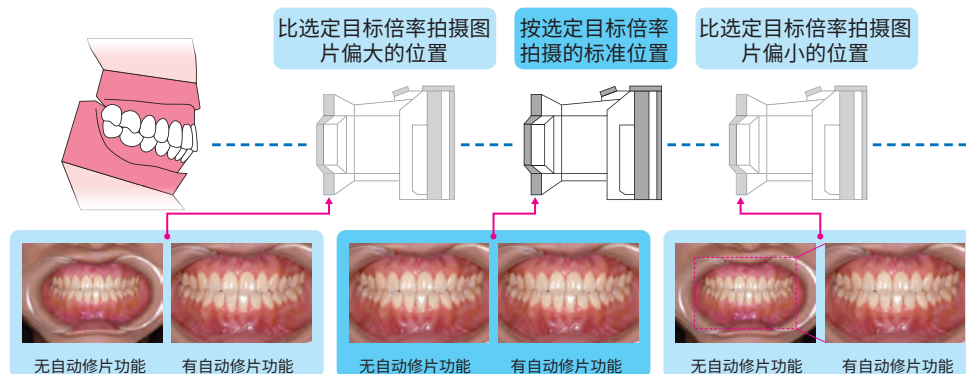

任何人都能轻松拍摄

摄影方式简单，任何人都能实现的完美拍摄



牙列对焦简单高效

具有很高的景深，对焦范围广，针对构图内的多种纵深均能完美对焦拍摄出清晰的图像。



防手抖

快门速度快，具有防抖效果。
* 除外某些模式及特殊设定


* 本相机显示屏仅用于图片确认，若想查询更精细的图像请使用电脑显示器

POINT
3


图像整理，有条不紊

图像管理，轻轻松松

患者的 ID 号码可记录在图像上

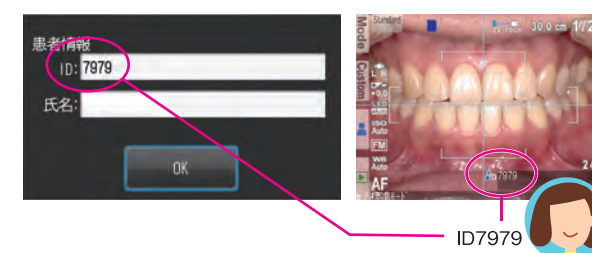

图像处理，便捷清晰

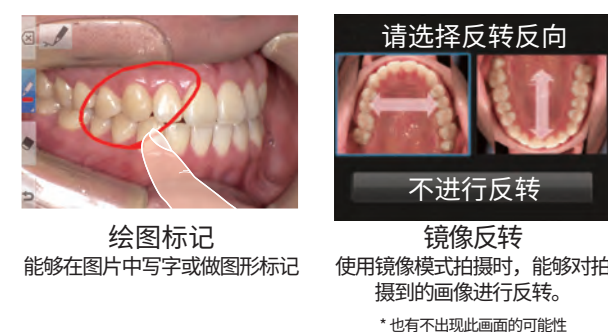


使用松风 sure file 软件，轻松录入分类整理

根据拍摄时录入的患者 ID 信息，导入电脑时可以自动分配存储相应文件夹。

需要安装松风 sure file 软件，请在与相机连接使用的电脑中安装 surefile。

可登陆我公司网站下载使用：www.shofu.co.jp/surefile/

* 国内下载近期发布

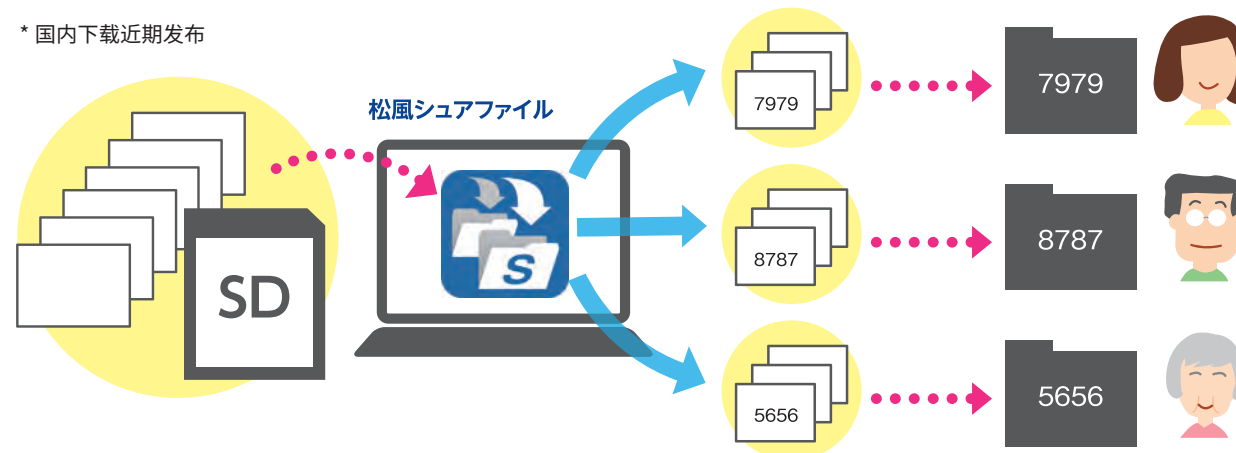OTHER
FUNCTIONS

具有高水准的色调再现性

口内色调再现性能提升

由世界级瓷学专家山本真监制进行的色彩设计，能再现自然地色调色彩。

* 色调再现效果与使用的显示器以及打印机有关



充分考虑明暗差异、阴影与反光的闪光灯设计

● 获得正常曝光度的 FM 调光 (特许第 3847319 号)



加载了适应摄影距离自动调整光量的 FM 调光功能。不管拍照对象距离如何变化、背景明暗度的差异、有无牙科灯光，均能自动调整出适合拍照对象的曝光量。

● 内外共 4 个闪光灯

内外共加载 4 个闪光灯，可获得与各场景最匹配的照明效果。



* 根据拍摄模式的不同会有闪光的差异

如欲了解更多关于 EyeSpecial C-IV 的相关信息，请登录：www.shofu.co.jp/pickup/eyespecialc4

• 包装



EyeSpecial C-IV
1 台

【内容】相机 1 台、微距特写镜头 1 个、灰卡 1 张、SDHC 卡（16GB）1 张、镜头盖 1 个、肩带 1 条、5 号碱电池 4 节

• 规格参数

传 感 器	种 类	原色滤色镜、彩色 CMOS
	屏 幕 尺 寸	1/1.7 英寸
	总 像 素	约 1,200 万像素（4,163X3,062）
变 焦	方 式	电动光学变焦 + 电子变焦
对 焦	模 式	单次拍摄 AF（自动对焦）以及定距离 MF（手动对焦）
A E （ 曝 光 ）	方 式	TTL 测光 / FM 调光
拍 摄	模 式	标准 / 手术 / 镜像 / 肖像 / 低反射 / 美白 / 微距放大 / 比色 / 视频
闪 光	方 式	内侧 2 灯 / 外侧 2 灯，共 4 灯
	调 光	FM 调光以及根据传感器自动调光
L E D 照 明	方 式	照明用白色 LED 灯 4 个
	照明发光模式	0（OFF）/ 1/2/3/AUTO 自动
存 储	存 储 媒 介	SD/SDHC/SDXC 卡（MAX512GB）
	存储图像格式	JPEG/MOV（与患者信息文件（MIF））搭配组合
使 用 电 池		5 号电池 4 个（碱性干电池 / 充电式镍氢电池）
重 量		约 590g（机身重量，附属物除外）
外 形 尺 寸		W176XD125XH80（mm）（除外突出部位及附属物）

• 单独销售



一键安装，一键拆卸

交叉偏振光滤镜
松风偏光镜 Cross-Polarize
1 个

对应机型：EyeSpecial C-IV **注意：**不适用于 EyeSpecial C-IV 以前各机型

欲了解更多松风信息
请扫描下方二维码



贡献于世界齿科医疗的

株式会社 松風

本 社：〒605-0983 京都市東山区福稲上高松町11・日本

松風齿科器材貿易(上海)有限公司: 上海市松江区佘山工业区吉业路645号 (201602) 电话: (8621) 57796980 传真: (57796981) E-mail: shanghai@shofu.com.cn

<http://www.shofu.com.cn>