

Dura-Green® Stones

绿色砂石



- 切削能力与耐磨性的良好结合
- 砂粒致密、均匀，轴心稳定，不损伤手机



Dura-Green® Stones

绿色砂石

加工所打磨修复体时的优良选择

绿色砂石由高品质碳化矽砂粒制成，可以快速打磨烤瓷、复合树脂、贵金属和银汞合金等。

特性


砂粒颗粒均匀，由独特的中等大小的特殊颗粒制成。与其他品牌相比，切割烤瓷不会崩瓷。

轴柄由优质不锈钢制成，轴径、轴心稳定，均符合ISO要求，不易损伤手机。

轴部与磨头的粘结力强，不脱落

切削性能优异 —— 耐用、切削力强、利于快速成型

轴柄与磨头粘结脱落测试

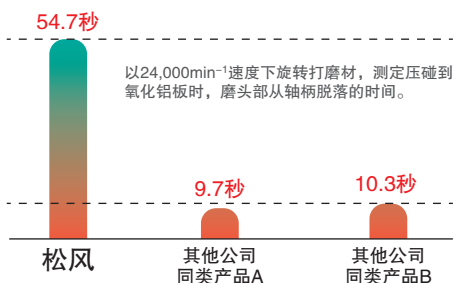


根据拉张测试进行粘结强度测试和苛刻测试（在加热时确认粘结性），根据苛刻测试的结果，其他公司的产品在加热情况下轴柄和磨头部的粘结性显著下降，立即脱落，而松风的产品与其相比较难脱落，耐热持久性高。


注意事项

- ① 转速：5,000–20,000min⁻¹，最大不超过30,000min⁻¹
- ② 适用于高速手机、慢速弯机头、慢速直机头。
- ③ 在湿润环境下打磨。
- ④ 所有打磨材均可高温高压消毒。
- ⑤ 由于是碳化矽砂粒组成，遇到高温会产生气泡，所以不可用于打磨金属内冠。


打磨材形态

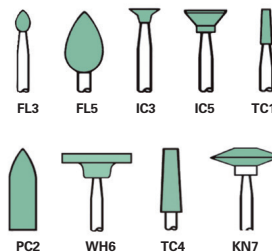

包装

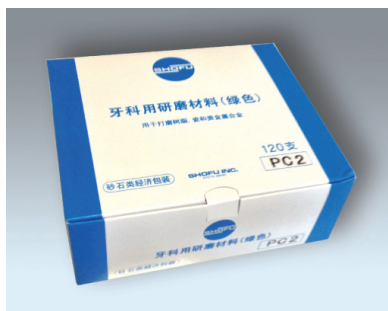

绿色砂石经济装：
同种形态，120支包装

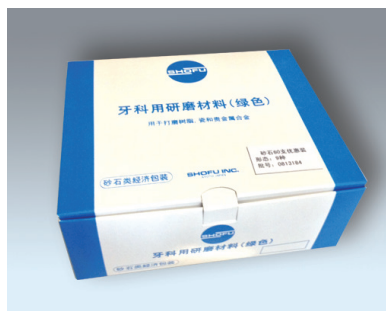

绿色砂石促销优惠装：
包含9种形态，共60支，方便客户选用



贡献于世界齿科医疗的

株式会社 松風

本社：〒605-0983京都市東山区福稲上高松町11・日本

松風齿科器材贸易(上海)有限公司：上海市松江区佘山工业区吉业路645号 (201602) 电话：(8621) 57796980 传真：(57796981) E-mail: shanghai@shofu.com.cn

<http://www.shofu.com.cn>