

具有优秀耐久性的新材料（MF-H）的开发

牙釉质层 / 牙本质部分：采用 MF-H 复合材料

采用含有混合状微填料的 MF-H 新材料（Micro Filled hybrid composite），将耐磨性，抗染色性，粘结性和机械性完美融合的硬质树脂牙。

基层层

采用与基托用树脂有完美粘结效果的丙烯酸树脂。


接近天然牙的美观性




天然牙



天然牙的荧光性

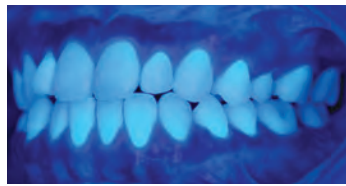

其他人工牙的荧光性

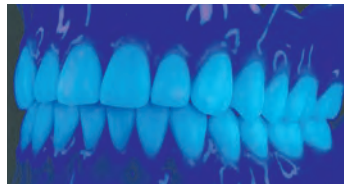

Veracia 唯真牙的荧光性

优秀的抗染色性和抗变色性

采用了 MF-H 复合材料，发挥其优秀的抗染色性，表现出与丙烯酸树脂人工牙同等的抗染色性。即使在口腔内长期使用，仍具备优秀的抗染色性。

实验前



左：Veracia 右：松风 丙烯酸树脂人工牙

实验后



左：Veracia 右：松风 丙烯酸树脂人工牙


（染色实验：在 0.1% 的若丹明溶液中加热至沸腾 10 分钟）

以上的图片为硬质树脂牙：Veracia 和丙烯酸树脂人工牙的染色实验前后对比照片。

优秀的粘结性

基层层自不必说，硬质树脂的牙釉质部分也能够与丙烯酸系基托用树脂完美粘结。

在牢固的粘结下，毋需担忧牙釉质和基托用树脂剥离，可以安心使用。

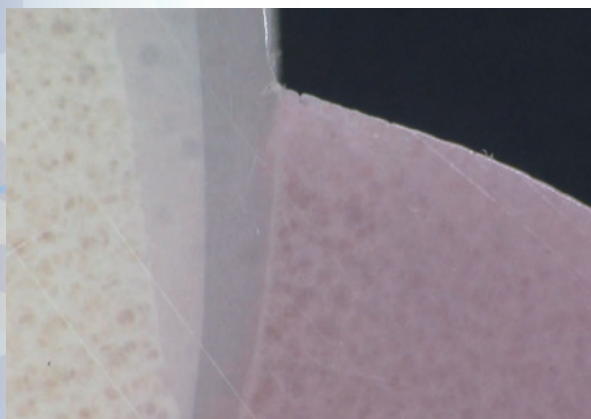

牙釉质层和基托树脂的粘结

光滑的咬合面

MF-H 复合材料，易操作，简单地调整咬合，就能够得到光滑的咬合面，防止牙菌斑的附着，以及由牙菌斑引起的牙齿变色。



使用了研磨砂石后



牙面研磨抛光后

广泛的用途

因为本产品可以在常温聚合树脂以及齿冠用硬质树脂上粘结使用，故可用于修复以及个性化处理。

应用在抛光上



在齿冠用硬质树脂（Ceramage Flowable 复合树脂 F-50）上重建咬合面



包装 - 规格



VERACIA 前牙 16 排 / 盒



VERACIA 后牙 12 排 / 盒

商品名	颜色	形态
VERACIA 前牙 16排/盒	5色： A1、A2、A3、A3.5、B2	上颌13种形态：S（方型）、O（圆型）、ST（混合型）、LT（长尖型）、LS（长方形） 下颌8种形态：NA（年轻型）A（壮年型）LA（健壮型）
VERACIA 后牙 12排/盒	4色：A2、A3、A3.5、B2	上下颌各3种：S / M / L

相关产品



平均值殆架 IG



半调节性殆架 IIG



半调节性殆架 IIIEG



面弓

Veracia 唯真牙

生物功能性合成树脂牙



致力于与人体的完美结合



贡献于世界齿科医疗的

株式会社 松風

本社：〒605-0983京都市東山区福福上高松町11・日本

松風齿科器材贸易(上海)有限公司：上海市松江区佘山工业区吉业路645号 (201602) 电话：(8621) 57796980 传真：(57796981) E-mail：shanghai@shofu.com.cn

<http://www.shofu.com.cn>



临床病例

全口义齿 I

写真提供：東京都中央区 銀座深水歯科 院長 深水 皓三先生／兵庫県芦屋市 PTD LABO代表 堤 嵩詞先生



临床病例

全口义齿 II


写真提供：大阪大学歯学部 附属病院咀嚼障害補綴科 教授 野首 孝嗣先生



临床病例

局部义齿

写真提供：東京都中央区 銀座深水歯科 院長 深水 皓三先生／兵庫県芦屋市 PTD LABO代表 堤 嵩詞先生

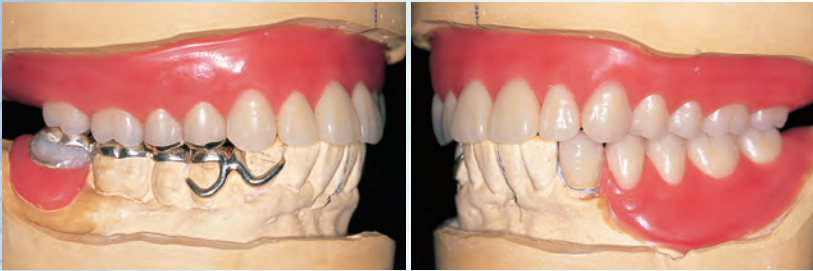


规格

【形态】

前牙（上颌）

以松风生物形态的基本形态为基础，我们设计了五种独立的前牙形状，分别为：

- S：方形
- O：卵圆形
- ST：混合形
- LT：长尖形
- LS：长方形

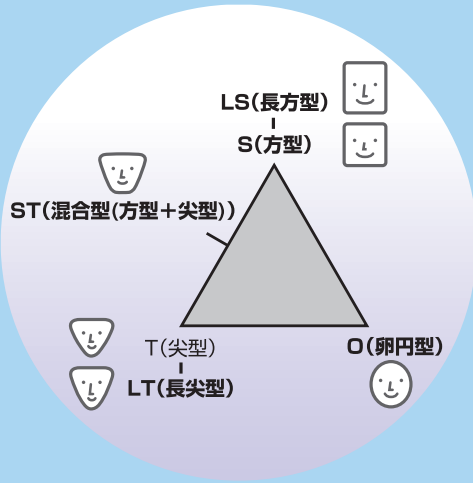


前牙（下颌）

下颌的咬合磨耗形态

A, LA 形为切缘咬合磨耗的形态

- NA（青年型）
切缘未咬合磨耗的形态
- A（壮年型）
切缘咬合磨耗后的形态
- LA（长壮年型）
切缘咬合磨耗后，长形牙冠的形态

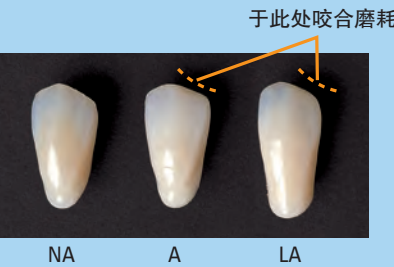

记号的读法



Veracia 唯真牙 - 前牙的规格 / 尺寸

上
颌

S4 方型	10.4 8.0 42.8 51.0	
O4 卵円型	9.9 8.0 42.8 51.0	
ST4 混合型	10.7 8.0 42.8 51.0	
LT5 長尖型	12.1 8.5 45.5 54.0	
LS5 長方型	11.9 8.5 45.5 54.0	

S5 方型	11.1 8.5 45.5 54.0	
O5 卵円型	10.5 8.5 45.5 54.0	
ST5 混合型	11.4 8.5 45.5 54.0	
LT6 長尖型	12.7 9.0 48.2 57.0	
LS6 長方型	12.5 9.0 48.2 57.0	

S6 方型	11.7 9.0 48.2 57.0	
O6 卵円型	11.1 9.0 48.2 57.0	
ST6 混合型	12.0 9.0 48.2 57.0	

下
颌

NA4 若年型	9.6 4.8 33.2 38.0	
A4 壮年型	9.3 4.8 33.2 38.0	
LA5 長壮年型	10.9 5.0 35.3 40.0	

NA5 若年型	10.2 5.0 35.3 40.0	
A5 壮年型	9.8 5.0 35.3 40.0	
LA6 長壮年型	11.5 5.2 37.3 42.0	

NA6 若年型	10.8 5.2 37.3 42.0	
A6 壮年型	10.4 5.2 37.3 42.0	

前牙上下颌尺寸的读法

- 中切齿的长度（图片中阴影部分除外）
- 中切齿的宽度
- 6 颗牙的总宽度（平面）
- 6 颗牙的总宽度（弧面）

后牙上下颌尺寸的读法

- 单侧 4 颗牙总宽度
- 第一前磨牙的长度
- 第一磨牙颊舌径的宽度
- 单侧 4 颗牙总宽度
- 第一前磨牙的长度
- 第一磨牙颊舌径的宽度

Veracia 唯真牙 - 后牙的规格 / 尺寸

S	
M	
L	

关于上下颌的对应

前牙：根据不同临床病例的具体情况，可以从上下颌前牙的基本型号中选出相应型号，进行组合。
标准的上下颌的组合，则需根据目测挑选出相同大小的上下颌前牙，加以组合即可。

后牙：挑选出上下颌相同型号的后牙（S，M，L），加以组合即可。

关于前牙的互换性

型号不同，但尺寸相同的中切齿，侧切齿，尖牙的牙宽都是相同的，因此可以互换。

前牙，后牙的色号对应表

Veracia 前牙（5 色）	Veracia 后牙（5 色）
A1, A2	A2
A3	A3
A3.5	A3.5
B2	B2