


BEAUTIFIL Flow Plus 氟及多种功能性离子的释放及再充


Beautiful Flow Plus中含有S-PRG填料，具有氟离子及多种功能性离子的释放及再充功能。

*氟素的涂布以及含氟牙膏刷牙之后，材料中的氟离子可以再充入材料中，循环往复，可以达到氟离子持续释放的效果。

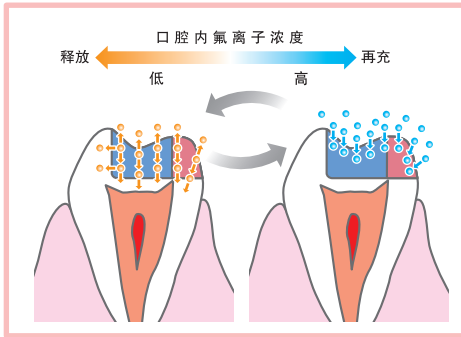

与天然牙类似的光扩散性

Beautiful Flow Plus 采用S-PRG多功能玻璃填料技术，材料具有与天然牙类似的优异的光扩散性（切端釉质色除外），因此能表现出自然感，适用于美学修复。

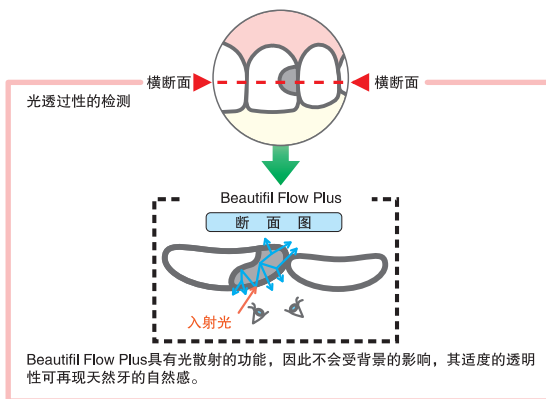

与Beautiful系列产品色调统一

与本系列聚合体Beautiful II、Beautiful Flow具有同样的色调及透明性，各聚合体混合应用或修复使用时均可再现美学效果。

Beautiful Flow Plus	Beautiful Flow	Beautiful II
F00 A3	F03 A3	F02 A3
F03 A3	F10 A3	F10 A3
F02 A3	F02 A3	F02 A3
F10 A3	F10 A3	F10 A3

Beautiful Flow Plus 与 Beautiful Flow 适用示范


Beautiful Flow Plus

- 具有高强度及硬度，能有效对抗形变（可用于后牙承受咬合的部位）




F00
零流动型高强度注射树脂

F03
低流动型高强度注射树脂

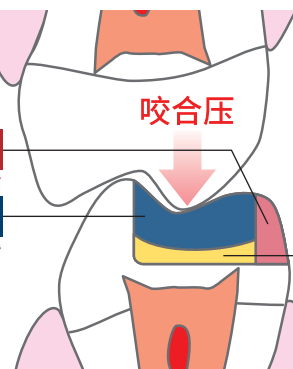

Beautiful Flow

- 具有弹性，能有效缓解应力，能减轻咬合时对牙髓的应力刺激（可用于洞衬及牙颈部的修复）

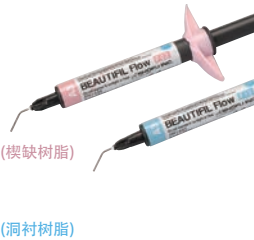

F02
低流动型高弹性流动树脂 (模缺树脂)

F10
高流动型高弹性流动树脂 (洞衬树脂)


包装信息



GIOMER

Beautiful Flow Plus 注射树脂

单支装 / 2.2g （含5个注射头）

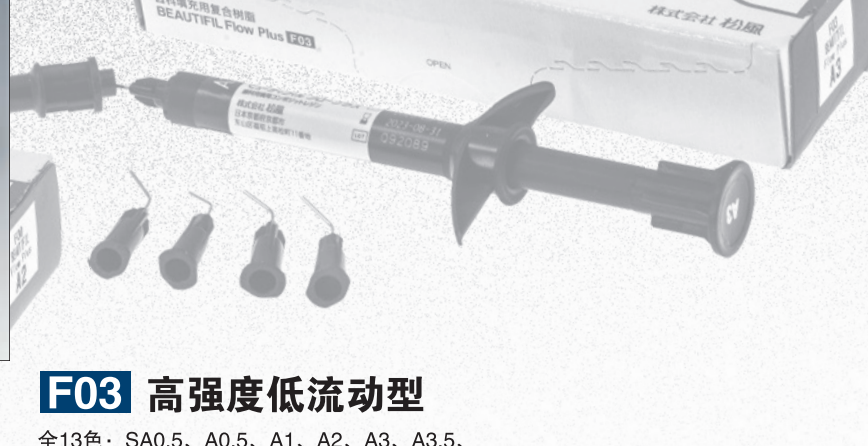

F00 高强度零流动型

全11色：SA0.5、A0.5、A1、A2、A3、SA0.5O、A0.5O、A1O、A2O、INC、BW

SA0.5	A0.5	A1	A2	A3	Inc

O：牙本质色 Inc：切端透明色 BW：漂白色
注：SA0.5色=A0.5色，SA0.5O色=A0.5O色，颜色一致

F03 高强度低流动型

全13色：SA0.5、A0.5、A1、A2、A3、A3.5、A4、A2O、A3O、INC、BW、MI、CV

SA0.5	A0.5	A1	A2	A3	A3.5	A4

MI：乳白色 CV：牙颈部色
注：SA0.5色=A0.5色，颜色一致

相关产品



Beautiful Flow F02
低流动型高弹性流动树脂
(模缺树脂) 2g/支
颜色：A1、A2、A3、A3.5、A3O、A4、G



Beautiful Flow F10
高流动型高弹性流动树脂
(洞衬树脂) 2g/支
颜色：A1、A2、A3、A3.5、A3O、A3T、A4



Beautiful II
通用型树脂(纳美)
颜色：A1、A2、A3、A3.5、A4、B1、B2、B3、C2、C3、Inc、BW、A2O、A3O




BEAUTIFIL E Posterior
后牙专用树脂 4g/支
颜色：SA0.5、A1、A2、A3、OT



BeautiBond
第七代自酸蚀树脂粘接剂
包含：BeautiBond 6ml 1瓶，小毛刷手
柄一只，涂布头：50个，V型碟：25个



Super-Snap
“彩虹”抛光碟
内容：2支Dura White白色砂石用于成形
1支硅橡胶磨头用于初抛光
180支Super-Snap抛光碟
2支针柄
40条树脂成形抛光条

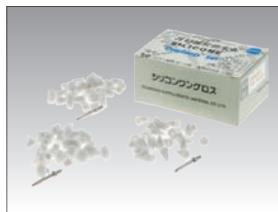

OneGloss Set
砂粒套装 (3种形态)
内容：25个Cup(杯状)
25个Midi(子弹头状)
25个Ic(圆锥状)
3支CA轴柄



CompoMaster
树脂精细抛光材
内容：提供CA和HP柄
3支/盒，组合装4支/盒



Composite Polishing Kit
树脂抛光套装CA
内容：绿色砂石2支
白色砂石2支
硅橡胶磨头6支
杯状和轮状磨头各1支



PEM Bright
光固化灯

欲了解更多松风信息
请扫描下方二维码



贡献于世界牙科医疗的

株式会社 松風


本社：〒605-0983京都市東山区福祇上高松町11・日本

松風齿科器材贸易(上海)有限公司：上海市松江区余山工业区吉业路645号 (201602)电话：(8621) 57796980 传真：(57796981) E-mail：shanghai@shofu.com.cn

http://www.shofu.com.cn

BEAUTIFIL Flow Plus

注射树脂

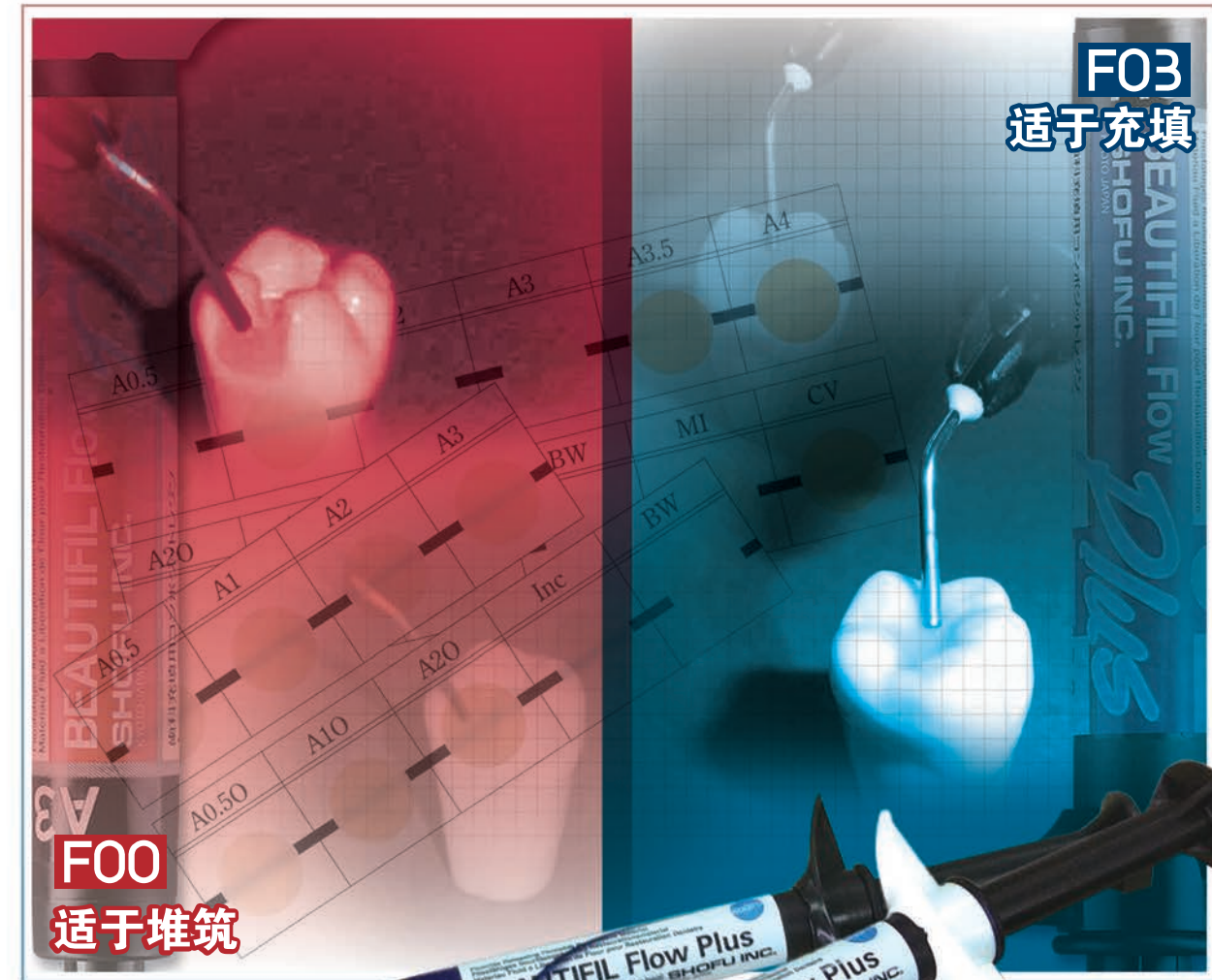

F00

适于堆筑

F03
适于充填

GIOMER

前后牙通用、氟释放与再充、高强度
新一代注射树脂



Minimally Invasive
Cosmetic Dentistry

A0.5A1A2A3A3.5A4

A20A1A2A3A3.5A4

A0.50A10A20IncBWMI

A0.50A10A20IncBWMI

Fluoride Releasing Flowable Restorative Material

BEAUTIFIL Flow *Plus*

Beautifil Flow Plus，具有氟再充及释放功能的高强度注射树脂，前后牙通用并有两种流动性，分别适合于结构堆筑及严密充填，带给临床操作极大程度的便利。

BEAUTIFIL Flow *Plus* F00 / F03 流动性比较

F00F03

0mm3mm

取等量糊剂置于玻璃板上，垂直静置1分钟后的流动状况

F00F03

取等量糊剂置于玻璃板上，水平静置1分钟后的流动状况

传统修复方式与现代注射修复方式的对比

传统修复方式

II类洞

传统树脂堆塑邻面壁

复合树脂

需要进行咬合面及边缘嵴的塑型

现代注射修复方式

F00直接注塑邻面壁

F00无需充填工具，可直接注射塑型牙尖及边缘嵴形态

F03充填咬合面未被充满的空间

不流动的注射树脂，型随我动，轻松塑型，Beautifil Flow Plus F00 能带给您便捷，轻松与完美！

流动性差别	临床操作过程	临床操作结果
0 mm	几乎不流动，形态不塌陷	不受时间的限制，有充足时间塑形，能够按照想象的形态进行堆塑
0.5 mm	出现少量的塌陷导致形态的变化	无充足时间进行形态调整，无法完全按照想象的形态进行堆塑

流动性0mm与0.5mm的差别在临床实际应用中，表现出更为显著的临床区别。

F00 零流动型

堆筑

适合

● 立体结构的搭建

[病例示范]

磨牙牙尖、嵴的构成

术前

Beautifil Flow Plus F00 A2结构堆筑中

[病例示范]

II类洞邻面壁的堆筑

术前

Beautifil Flow Plus F00 A2侧壁恢复

F03 低流动型

充填

适合

● 具有一定的流动性和形态维持性

[病例示范]

前磨牙咬合面充填

F00将牙尖及嵴塑型后，用F03将咬合面未充填的部分修复完成

牙冠结构的再现

术前

Beautifil Flow Plus F03 A1进行窝洞充填

联合应用示范

需进行下殆7的美学修复

去除金属嵌体

Beautifil Flow F02 A3洞衬

Beautifil Flow Plus F00 A0.5堆筑牙尖、嵴，结构轻松再现

Beautifil Flow Plus F03 A1 充填咬殆面

打磨抛光完成

BEAUTIFIL Flow *Plus* 适合于后牙咬殆面修复的物理性能

同样适合于II类洞的充填！

高强度的聚合体基质中添加了高密度的PRG填料，均衡的物理强度，不仅仅适用于前牙，对于承受更大咬殆力的后牙，也因其具有高屈服强度以对抗形变，成为适合后牙充填的高强度注射树脂。

屈服强度

MPa

150100500

1211157478

Beautifil Flow Plus F00Beautifil Flow Plus F03Beautifil Flow F02Beautifil Flow F10

弹性模量

MPa

150100~0

126129101104

Beautifil Flow Plus F00Beautifil Flow Plus F03Beautifil Flow F02Beautifil Flow F10

能够对抗各种咬殆力而不易产生形变

咬殆压

照片由 秋本尚武 先生惠赠