

Glaslonomer FX **ULTRA**

超越型玻璃离子充填水门汀



粉 钻

超越经典， 强势来袭



FX-ULTRA 超越型玻璃离子充填水门汀，采用了独特新配方，粉为新开发的氟铝硅酸盐玻璃粉，液为丙烯酸与三聚羧酸单体的共聚物。通过优化成分，提高反应活性，具有更高的抗压强度，实现了更加轻松调拌、便利充填的操作性能，并提高了透明度和颜色稳定性，实现了玻璃离子的美学性能。

操作性：调拌轻松，充填便利

粉液调拌轻松的调和状态

粘度适中，有弹性，便于充填

当日即可打磨抛光
从调拌开始，6分钟之后即可打磨

充足的操作时间 临床可从容应对

使用注射器操作时，可轻松推注。

不留空腔，可填满各个角落

玻璃离子水门汀的美学新时代


透明度提升

采用新型玻璃离子粉，透明度大幅提升



颜色稳定性

(混合开始后 10 分钟, 24 小时, 1 周)

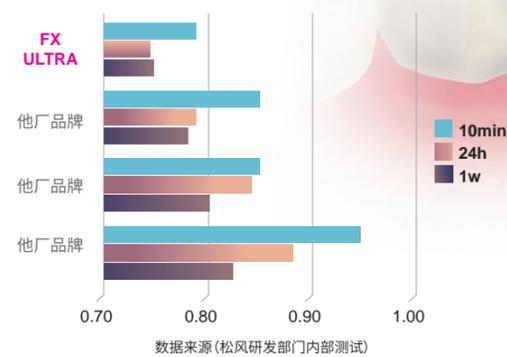

◆ 适用于多种临床病例的修复材料

- 理想的儿童及老年人修复材料
- I 类洞和 II 类洞的充填;
- III 类洞及 V 类洞，包括楔状缺损，根面龋以及边缘形态的修整;
- 临时或短期修复;
- 垫底，堆核或三明治修复技术;
- ART 以及微创修复

使用 FX ULTRA 玻璃离子完成 V 类洞修复




Photographs courtesy of Dr. Sushil Korale

针对高患龋风险者，隔湿困难者，治疗条件受限者，强烈推荐**使用玻璃离子进行充填治疗**

◆ 高强度及耐用性

FX ULTRA 玻璃离子使用特殊的玻璃以及聚丙烯酸配方，与高强耐用的玻璃离子基质形成稳定的离子结合，能持续承受口内各种应力，长期抗压强度会更高。

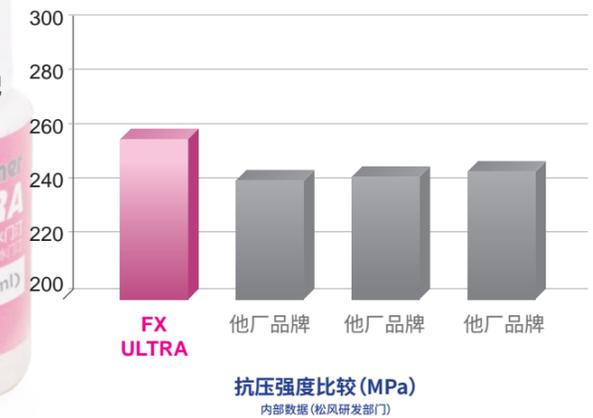


使用 FX ULTRA 玻璃离子完成后牙修复





Photographs courtesy of Dr. Kenji Murai

◆ 可靠粘接及预防功能

FX ULTRA 玻璃离子对牙釉质及牙本质均有可靠粘接，不需特殊处理，即可获得很高的剪切强度，降低潜在微渗漏，减少继发龋的发生。

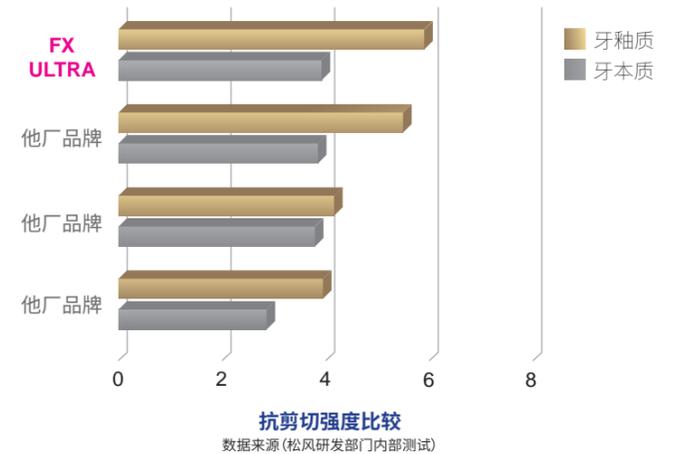

◆ 氟释放和再充

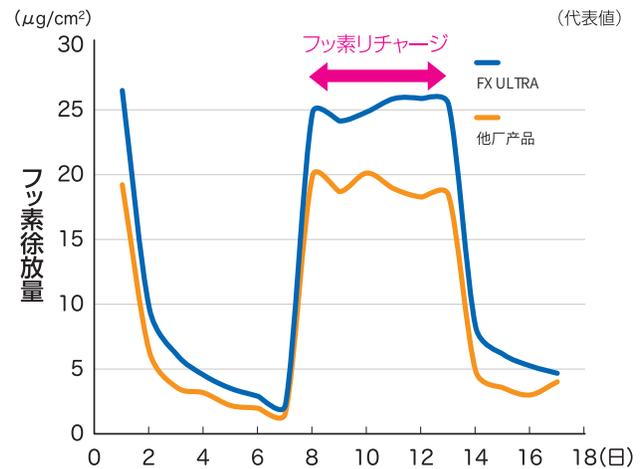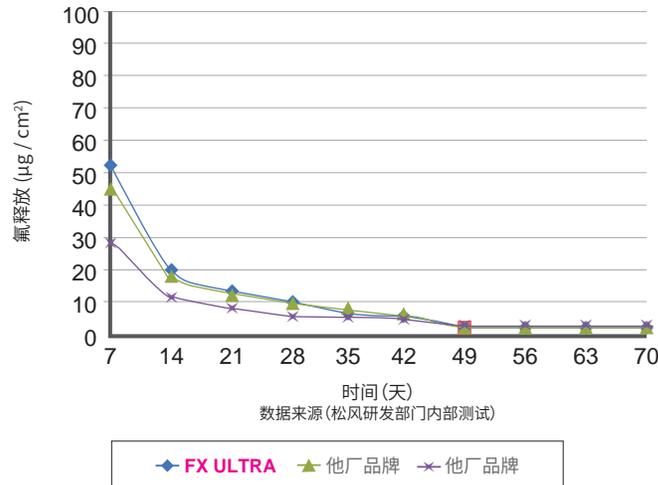

持续的氟释放与再充, 为防止继发龋的发生提供长久有效的生物活性。

FX Ultra 具有更高的氟释放量, 使用含氟牙膏刷牙时, 充填物还可以再充氟以维持较高的氟缓释功能。

◆ 简便快捷的操作性

粉: 液	1 勺粉: 1 滴液	
调拌时间 (23° C / 73 °F)	45"	从调拌开始算起
工作时间 (23° C / 73 °F)	2' 20"	从调拌开始算起
固化时间 (37° C / 99 °F)	2' 30"	从调拌结束算起

◆ 产品包装



超越型玻璃离子充填水门汀

颜色: A2, A3, A3.5, B2
 套装: 1-1
 粉: 15g 液: 10g (8ml)
 量勺、调拌刀、调拌纸
 保质期四年



◆ 相关产品



ZIRCONOMER 氧化锆加强型玻璃离子



FX-II 加强型玻璃离子充填材料



树脂修型套装 & 树脂抛光套装



矽粒子 Midi / / CUP

欲了解更多松风信息
 请扫描下方二维码



贡献于世界齿科医疗的

株式会社 松風

本社: 〒605-0983 京都市東山区福福上高松町11・日本

松風齿科器材贸易(上海)有限公司: 上海市松江区佘山工业区吉业路645号

(201602) 电话: (8621) 57796980 传真: (57796981) E-mail: shanghai@shofu.com.cn

http://www.shofu.com.cn