



染色瓷粉

72137

【产品名称】

染色瓷粉
(歯科セラミックス用着色材料 /Fluorescent Porcelain Stain)

【型号、规格】

型号	色号	规格
VINTAGE Art	P、Bl、O、W、B、Y、V、Gr、DR-Br、O-Br、K、AS、BS、CS、DS、RS、G、Bl-G、CY、Br、B-Br、RP、WR、P-O、F-AS、F-BS、F-CS、F-DS、F-RS、MP、Miv、GP	3g
	稀释液	50ml

【适用范围】

染色瓷粉是专为高溶瓷粉进行内部或外部的颜色修正而设计的专用材料。

【主要结构组成或者成分】

由 SiO₂、Al₂O₃、K₂O、Na₂O、CaO、B₂O₃、MgO、Sb₂O₃、TiO₂、Cr₂O₃、ZnO、Fe₂O₃、EuO、Co₂O₃、SnO₂、V₂O₅、WO₃、Ni₂O₃、ZrSiO₄、磷酸氢锰、硅石、碳酸镁、碳酸锶、硅酸锆制成。

【禁忌症】

对本产品过敏者禁用。

【使用说明】

[本产品的使用机械及器具]
齿科技工用烤瓷炉
加热速度为 10-100℃ / 分, 烧结温度区域在 100-1200℃, 能真空烧结的齿科技工用烤瓷炉。

【操作方法】

- 1) 清洁牙冠修复体
用水或者酒精除去作为染色对象的牙冠修复体上残留的污渍或油渍。
- 2) 准备
选取适宜颜色的糊剂放在玻璃板或调色托盘上, 可以自由地按照不同比例混色, 调和出理想的颜色。还可以适宜地添加稀释液, 以便获得所期待的涂抹感以及混色的粘稠度。
- 3) 涂抹
使用毛刷等按照常规方法进行涂抹。
- 4) 烧结
按照下表设定干燥以及烧结条件。

适用情形	炉口干燥预热 (分)	烧结程序 (℃)	保留时间 (分)
①	5 ~ 7	600-(A)-850 ~ 870	—
②	5 ~ 7	600-(A)-830 ~ 850	—
③	5 ~ 7	600-(A)-1000	2

[A : 大气烧结、升温速度 : 50 ~ 60℃/分]

- ① 用于外部染色时。(瓷牙冠的修复体及嵌体表面)
- ② 用于内部染色时。(适用于瓷基牙表面和遮色瓷烧结面以及体瓷的层间)
- ③ 用于瓷牙制品的表面。

【注意事项】

- [与使用方法相关的注意事项]
- 1) 使用本产品后, 请迅速关好瓶盖密封。
 - 2) 请按所需量取出本产品的糊剂和稀释液使用。若有剩余不可以再放回去。
 - 3) 不可直接用手触摸本产品。
 - 4) 取出来的糊剂和稀释液, 需要立即使用, 不可长时间放置。

- 5) 烧结温度根据烤瓷炉样式和种类而有所不同, 使用前需试烧以获取正确的烧结条件。
- 6) 仅限与本产品的附属稀释液配合使用。
- 7) 关于与本产品并用的牙科材料、机械以及器具, 应遵守各自相关的使用说明书等所记载的使用方法及使用上的注意事项。

【使用注意】

- 1) 本产品为可燃物, 必须避开火源使用。
- 2) 在对本产品的烧结物进行切削、研磨工作时, 为了避免粉尘对人体的影响, 请使用局部吸尘装置及相关部门认可的防尘口罩, 以防止吸入粉尘。
- 3) 请勿与其他厂家的产品混合使用。
- 4) 本产品不可用于【适用范围】所记载的用途之外。
- 5) 非牙科从业者不可使用本产品。

【重要的基本注意】

- 1) 在本产品的使用中, 若出现发疹、皮肤炎等过敏症的操作者, 请停止使用并速就医。
- 2) 注意不要将本产品附着到皮肤上或弄入眼中。万一进入了眼中时, 请立即用大量流水清洗后, 并接受眼科医生的诊治。

【贮存方法】

- 1) 本产品需避免阳光直射, 保存在室温 (1 ~ 30℃) 的场所。
- 2) 避免非牙科从业者接触本产品, 请妥善保存及管理。

【生产日期】

见包装

【使用期限】

无

【注册人 / 生产企业】

名称 株式会社 松风
住所 日本京都府京都市东山区福稻上高松町 11 号
生产地址 日本京都府京都市东山区福稻上高松町 11 号
电话 +81-75-561-1112

【代理人 / 售后服务单位】

名称 松风齿科器材贸易(上海)有限公司
住所 上海市松江区佘山工业区吉业路 645 号 1 幢 1-3 层
电话 021-5779 6980
传真 021-5779 6981

【注册证编号 / 产品技术要求编号】

国械注进 20152172229