

【产品名称】

牙科用研磨材料

【型号、规格】

松風研削・研磨材 (SHOFU Abrasive Kits)

【主要结构组成或者成分】

本产品是由牙科用金刚砂车针、牙科橡胶制抛光材、牙科用钨钢钻、牙科用研磨器材、牙科用磨砂研磨器具等根据需要组合构成的。

【禁忌症】

(用于患者时)

若出现发疹、皮肤炎等过敏症的患者，请中止使用并速就医。

【适用范围】

用于对齿科材料的研磨抛光

[作用对象]

牙齿、修复体

【使用说明】

- 1) 本产品在口腔内使用时，需进行灭菌处理。
- 2) 本产品的 HP、CA、FG 是安装在牙科用空气旋转驱动装置、牙科用气压式手机上、牙科电动式手机、牙科用电动机、微型马达、高速打磨机等上，按常规方法使用。
- 3) 本产品的砂轮、砂片等需先装配在牙科用夹石针上，再安装在牙科用电动机、高速打磨机上使用。
- 4) 口腔内使用后，若再使用时，需迅速用清洗液或消毒剂去除附着物后，进行灭菌处理。
灭菌方法：使用高温灭菌器进行灭菌
(134℃ 3 分或 121℃ 30 分)。
为了避免高温灭菌或水洗等沾水引起的生锈，灭菌时需迅速让其干燥。并且不可使用氯系药液等具有金属腐蚀性的药液。

【注意事项】

- 1) 使用时不可超过规定的最大转速。
- 2) 不可使用有变形、裂缝、损伤 (生锈、表面划伤、弯曲、污损) 等的产品。
- 3) 需确保本产品在牙科用夹石针上装配牢固。使用时，必须用右旋转。另外，薄型砂片等应将配附的垫圈夹上使用。
- 4) 请按照牙科手机的厂家说明书正确安装。确保将轴柄插入到底，并确认已卡牢。
- 5) 使用前需进行试转操作，确认无摇晃。
- 6) 由于工作部外形较细、较长、较大的容易发生弯曲或折断，因此在操作时应避免不合理角度或过度施压。

- 7) 本产品的牙科用橡胶制研磨材料 (硅橡胶类等)，在打磨时由于摩擦生热会引起橡胶劣化，因此使用时应避免过度施压和在转速下持续操作。
- 8) 使用本产品的牙科用橡胶制研磨材料 (硅橡胶类等) 对汞合金进行打磨时，为避免发烫，需在注水下操作，并确保将研磨残屑吸掉。
- 9) 在口腔内使用本产品时，需要在注水下，轻触并间断式地进行打磨。
- 10) 用本产品进行打磨时，请使用局部吸尘装置以及相关部门认可的防尘口罩等。
- 11) 为了防止眼睛受损伤，请使用护目镜等。
- 12) 由于天然橡胶偶尔会引发瘙痒、皮肤发红、荨麻疹、浮肿、发烧、呼吸困难、哮喘、血压降低、休克等的过敏性症状。如果出现上述症状，请立刻停止使用，并就医。
- 13) 本产品不可用于【适用范围】所记载的用途之外。
- 14) 非牙科专业人士不可使用本产品。
- 15) 禁止反复使用彩虹抛光碟。

【贮存方法】

- 1) 避免将本产品暴露在有水分、腐蚀性药剂以及腐蚀性蒸气的环境下。请保管在不受外力挤压 (物理负荷) 和污染的地方。
- 2) 避免非牙科专业人士接触到本产品，请妥善保存及管理。

【生产日期】

见包装批号 ([LOT] MMYYXX → 20YY 年 MM 月生产)

【使用期限】

无有效期

【备案人 / 生产企业】

名称	株式会社 松风
住所	日本京都府京都市东山区福稻上高松町 11 番地
电话	+81-757-561-1112
生产地址	日本京都府京都市东山区福稻上高松町 11 番地 日本京都府久世郡久御山町市田新珠城 21 番地 1

【代理人 / 售后服务单位】

名称	松风齿科器材贸易 (上海) 有限公司
住所	上海市松江区余山工业区吉业路 645 号 1 幢 1-3 层
电话	021-5779 6980
传真	021-5779 6981

【备案凭证编号 / 产品技术要求编号】

国械备 20170333 号