



牙科用研磨材料

72198

【产品名称】

牙科用研磨材料

【型号、规格】

セラマージュ研磨キット (CERAMAGE POLISHING KIT)

【适用范围】

用于对齿科材料的研磨抛光

〔作用对象〕

硬质树脂

【主要结构组成或者成分】

本产品是由锐刃钨钢钻、硅橡胶磨头、松风毛刷、专用抛光绒轮、DURA-POLISH 抛光膏以及松风夹石针构成。

1) 锐刃钨钢钻、硅橡胶磨头、松风毛刷、松风夹石针

种类	工作部	轴柄部	轴柄部形式
锐刃钨钢钻	碳化钨	不锈钢	轴柄部形式 2 (HP 用)
硅橡胶磨头 HR	合成橡胶结合 氧化铝磨粒	不锈钢	
松风毛刷	羊毛刷	镍镀钢	
松风毛刷 SC	含有磨粒的 酰胺毛刷	镍镀钢	

2) 专用抛光绒轮

羊毛制圆片状绒毡。

种类	大小	厚度
#1602	φ16mm	2mm
#2405	φ24mm	5mm

3) DURA-POLISH 抛光膏

在蜡里面均匀分布有磨粒的蜡研磨混合物。

种类	磨粒	成分	色调
氧化铝抛光膏 (DURA-POLISH)	氧化铝	蜂蜡、颜料、 其他	蓝紫色
钻石抛光膏 (DURA-POLISH DIA)	金刚砂	蜂蜡、硬脂酸、 其他	浅灰色

【使用说明】

- 1) 使用锐刃钨钢钻对咬合面的细部进行调整。
- 2) 使用硅橡胶磨头 HR 以及松风毛刷 SC 将表面的切痕去除, 修整平顺。
- 3) 使用松风毛刷和氧化铝抛光膏进行研磨抛光。
- 4) 使用松风毛刷和专用抛光绒轮以及钻石抛光膏进行抛光, 直至呈现光泽。

【注意事项】

- 1) 本产品不可在口腔内使用。
- 2) 使用时候不可超过规定的最大转速。

种类	最大转速
锐刃钨钢钻	50,000min ⁻¹
硅橡胶磨头	20,000min ⁻¹
松风毛刷	10,000min ⁻¹
专业抛光绒轮	10,000min ⁻¹

- 3) 不可使用有变形、损伤(生锈、表面划伤、弯曲、污损)等的产品。
- 4) 请按照牙科手机的厂家说明书正确安装。确保将轴柄插入到底, 并确认已卡牢。
- 5) 使用前需进行试转操作, 确认无摇晃。
- 6) 不可强扭强拧, 避免不合理角度以及过度施压。
- 7) 锐刃钨钢钻在使用刚开始时, 较容易折断, 需要格外注意。
- 8) 由于锐刃钨钢钻工作部细长容易折断, 应小心操作, 用力尽量轻柔。
- 9) 作部的尖锐部的使用深度应在 0.8mm 左右以内, 不可使用其他部位(如工作部的侧面等)。
- 10) 锐刃钨钢钻容易扎伤手指以及折断工作部, 操作时要充分注意。

- 11) 为了避免因高速运转可能引起的 DURA-POLISH 抛光膏的飞溅, 请将转速控制在 10,000min⁻¹ 以下使用。
- 12) 为了避免 DURA-POLISH 抛光膏从容器中飞溅出来, 请在向毛刷上涂抹时, 不要用力强压。
- 13) 松风夹石针必须使用右旋转。
- 14) 用本产品进行打磨时, 请使用局部吸尘装置以及相关部门认可的防尘口罩等。
- 15) 为了防止眼睛受损伤, 请使用护目镜等。
- 16) 本产品不可用于【适用范围】所记载的用途之外。
- 17) 非牙科专业人士不可使用本产品。

【贮存方法】

- 1) 避免将本产品暴露在有水分、腐蚀性药剂以及腐蚀性蒸气的环境下。请保管在不受外力挤压(物理负荷) 和污染的地方。
- 2) 避免非牙科专业从事者接触到本产品, 请妥善保管及管理。

【生产日期】

见包装批号 (〔LOT〕 MMYYYXX → 20YY 年 MM 月生产)

【使用期限】

无有效期

【包装】

- 1) 锐刃钨钢钻 HP : 1 支
- 2) 硅橡胶磨头 HR
①HP 11、13 S : 各 1 支
②HP 28 : 2 支
- 3) 松风毛刷、松风毛刷 SC : 各 1 支
- 4) 氧化铝抛光膏 20g : 1 个
- 5) 钻石抛光膏 5g : 1 个
- 6) 专用抛光绒轮
① # 1602 : 2 个
② # 2405 : 1 个
- 7) 松风夹石针 HP : 2 支

【备案人 / 生产企业】

名称 株式会社 松风
住所 日本京都府京都市东山区福稻上高松町 11 番地
电话 +81-75-561-1112
生产地址 日本京都府京都市东山区福稻上高松町 11 番地

【代理人 / 售后服务单位】

名称 松风齿科器材贸易(上海) 有限公司
住所 上海市松江区佘山工业区吉业路 645 号 1 幢 1-3 层
电话 021-5779 6980
传真 021-5779 6981

【备案凭证编号 / 产品技术要求编号】

国械备 20170333 号