

牙科用研磨材料

72204

【产品名称】

牙科用研磨材料

【备案凭证编号 / 产品技术要求编号】

国械备 20170333 号

【型号、规格】

松風ピボットブラシ (SHOFU PIVOT BRUSH)

【主要结构组成或者成分】

种类	工作部	轴柄部
松风毛刷	羊毛刷	镍镀钢
松风毛刷 SC	含有磨粒的酰胺毛刷	镍镀钢

【适用范围】

用于对齿科材料的研磨抛光

[作用对象]

牙科修复体和硬质树脂

【使用说明】

- 1) 安装在牙科用电动机、技工打磨机上使用。
- 2) 使用松风毛刷，沾上 DURA-POLISH 等技工用研磨用抛光膏，用于牙科修复体的研磨抛光。
- 3) 使用松风毛刷 SC，利用其含有磨粒的毛刷，用于硬质树脂的技工研磨抛光。

【注意事项】

- 1) 使用时不可超过规定的最大转速 $10,000\text{min}^{-1}$ 。
- 2) 不可使用有变形、损伤等的产品。
- 3) 请按照牙科手机的厂家说明书正确安装。确保将轴柄插入到底，并确认已卡牢。
- 4) 使用前需进行试转操作，确认无摇晃。
- 5) 操作时应避免不合理角度或过度施压。
- 6) 因为本材料的金属部分有可能生锈，所以应避免暴露在潮湿的环境中。
- 7) 不可在口腔内使用。
- 8) 用本产品进行打磨时，请使用局部吸尘装置以及相关部门认可的防尘口罩等。
- 9) 为了防止眼睛受损伤，请使用护目镜等。
- 10) 本产品不可用于【适用范围】所记载的用途之外。
- 11) 非牙科专业人士不可使用本产品。

【贮存方法】

- 1) 避免将本产品暴露在有水分、腐蚀性药剂以及腐蚀性蒸气的环境下。请保管在不受外力挤压（物理负荷）和污染的地方。
- 2) 避免非牙科专业人士接触到本产品，请妥善保存及管理。

【生产日期】

见包装批号 ([LOT] MMYXXX → 20YY 年 MM 月生产)

【使用期限】

无有效期

【备案人 / 生产企业】

名称 株式会社 松风
住所 日本京都府京都市东山区福稻上高松町 11 番地
电话 +81-75-561-1112
生产地址 日本京都府京都市东山区福稻上高松町 11 番地

【代理人 / 售后服务单位】

名称 松风齿科器材贸易(上海)有限公司
住所 上海市松江区佘山工业区吉业路 645 号 1 幢 1-3 层
电话 021-5779 6980
传真 021-5779 6981