



Light-cure Self-etching
One Component Dental Adhesive

BeautiBond

光固化自酸蚀一步粘结剂

注册人/生产企业

株式会社 松风

住所：日本京都府京都市东山区福稻上高松町11番地
生产地址：日本京都府京都市东山区福稻上高松町11番地
电话：+81-75-561-1112

代理人/售后服务单位

松风齿科器材贸易（上海）有限公司

住所：上海市松江区佘山工业区吉业路645号1幢1-3层
电话：021-5779 6980 传真：021-5779 6981

72742



查阅使用说明



温度极限



怕晒和怕热

严禁火源

说明书

修订日期: 2022年1月

【产品名称】

光固化自酸蚀一步粘结剂

【型号、规格】

型号	BeautiBond
规格	单瓶装：粘结剂 6mL/ 瓶 附件:小毛刷 [粉色]50 个(手柄 1 个、小毛刷头 50 个); 操作盘 25 个
	子弹装：粘结剂 0.1mL 50 个, 附件：毛刷 50 个

【适用范围】

牙齿洞型损伤和树脂修复的粘结（包括牙本质）

【结构及组成】

丙酮、精制水、双酚A甲基丙烯酸缩水甘油酯、羧酸单体、三乙二醇二甲基丙烯酸酯、亚磷酸系单体、樟脑酮、二甲醚氨基苯酸乙基、氟化物、二丁基羟基甲苯。

【禁忌证】

- 1) 对本品或甲基丙烯酸系单体以及丙酮曾有过发疹、皮肤炎等过敏症的患者请勿使用。
- 2) 对本品或甲基丙烯酸系单体以及丙酮曾有过发疹、皮肤炎等过敏症的操作者请勿使用。

【使用说明】

- 1) 按照常规方法进行牙齿表面清洁。
- 2) 按照常规方法进行牙体预备。
- 3) 按照常规方法用橡皮障隔湿。
- 4) 如果近牙髓用氢氧化钙垫底。
- 5) 取适量BeautiBond光固化自酸蚀一步粘结剂至操作盘中后，立即盖紧瓶盖，用小毛刷将取出的粘结剂均匀涂在整个窝洞表面。
- 6) 静置10秒钟，用不致吹飞本品的低气压压缩空气吹3秒之后，再用较强的压缩空气吹干，直至形成薄且均匀的粘结层。
- 7) 用光固化灯进行光照射

齿科用固化装置	卤素光固化灯	LED 光固化灯
光照射时间	10 秒	5 秒
光照波长	400-500nm	440-490nm
光照强度	≥ 500mW/cm ²	≥ 1200mW/cm ²

- 8) 光固化材料充填，光照，打磨和抛光。

【注意事项】

- 1) 产品从冰箱取出，需回暖至室温后再使用。
- 2) 使用完毕请立即拧紧瓶盖，并及时把取出的材料用于患者。
- 3) 小毛刷为一次性使用品。
- 4) 属于易燃产品，需要远离火源。
- 5) 不要与其他粘结剂混合使用。
- 6) 在良好的通风环境中使用，避免吸入丙酮（如果有吸入丙酮引起的恶心或其他反应的，建议移至到空气新鲜的地方保暖休息）。

- 7) 如果本产品接触到口腔软组织，组织会变白，但2-3天就会消失（不要触摸或刷该区域）。
- 8) 使用保护手套和护目镜避免直接接触到本产品。
- 9) 避免接触到衣服，如不小心接触到，请立即用酒精棉球去除。
- 10) 本产品只适用于【适用范围】所记载的用途。
- 11) 本产品仅供牙科专业人员使用。

【贮存方法】

- 1) 贮存在冰箱中（1-10℃），并远离火源。
- 2) 避免非牙科专业人士接触到本品，请妥善保存及管理。

【生产日期】

见包装

【使用期限】

有效期：3年

本产品的使用期限见包装所示。

（☞ YYYY-MM-DD →表示使用期限至YYYY年MM月DD日）

【包装】

[单品包装]

粘结剂6mL/瓶

【注册人/生产企业】

名称 株式会社 松风
住所 日本京都府京都市东山区福稻上高松町 11 番地
生产地址 日本京都府京都市东山区福稻上高松町 11 番地
电话 +81-75-561-1112

【代理人/售后服务单位】

名称 松风齿科器材贸易（上海）有限公司
住所 上海市松江区佘山工业区吉业路 645 号 1 幢 1-3 层
电话 021-5779 6980
传真 021-5779 6981

【注册证编号/产品技术要求编号】

国械注进20173172023