



Light cure dental restorative material

BEAUTIFIL II

复合树脂充填材料



查阅使用说明



温度极限



怕晒和怕热

☒射线阻射性

Polymer-based dental restorative material

注册人/生产企业

株式会社 松风

住所：日本京都府京都市东山区福稻上高松町11番地
生产地址：日本京都府京都市东山区福稻上高松町11番地
电话：+81-75-561-1112

代理人

松风齿科器材贸易（上海）有限公司

住所：上海市松江区佘山工业区吉业路645号1幢1-3层
电话：021-5779 6980 传真：021-5779 6981

72556

说明书

修订日期:2020年6月

【产品名称】

复合树脂充填材料

【型号、规格】

型号	BEAUTIFIL II
规格	4.5g/支
色号	A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, Inc, A2O, A3O, BW

【适用范围】

适用于牙体缺损的充填修复。

【结构及组成】

本产品主要由：碳氟化铝硅酸盐玻璃、表面处理材（钛酸酯耦合材）、双酚A-甲基丙烯酸缩水甘油酯、聚氨酯二丙烯酸酯、三乙二醇二甲基丙烯酸酯、氧化铝、二氧化硅、表面处理材（硅石）、微粒子硅酸、干燥的聚丙烯酸粉末、羧乙基甲基丙烯酸盐、二月桂酸二丁基锡、樟脑醌、磷酸、黄色氧化铁、三氧化二铁、黑色氧化铁、二氧化钛、2, 5-二羟基对苯二甲酸乙酯组成。

【禁忌症】

- 1) 对本产品或甲基丙烯酸系单体曾有过发疹、皮炎等过敏症的患者请勿使用。
- 2) 对本产品或甲基丙烯酸系单体曾有过发疹、皮炎等过敏症的操作者请勿使用。

【使用说明】

[本产品所用的牙科光固化灯及光照射时间]

- 1) 卤素光固化灯
以卤素光灯为光源、有效波长区域在400～500 nm、放射照明度为500 mW/cm² 以上的牙科光固化灯
- 2) LED光固化灯
以蓝色LED（光固化灯发光光谱有单一峰值）为光源、有效波长区域在440～490 nm、放射照明度为1000 mW/cm²以上的牙科光固化灯

牙科光固化灯	卤素光固化灯	LED 光固化灯
光照射时间	20 秒	10 秒

[操作方法]

- 1) 清洁牙面
去除附着在牙面上的菌斑及污渍。
- 2) 选择颜色
在牙面湿润的状态下，使用比色板来选择颜色。
- 3) 形成窝洞
按照通常方法形成窝洞。
- 4) 隔离防湿
使用橡皮障等进行隔离防湿。
- 5) 保护牙髓
对接近牙髓的窝洞内的牙本质处，使用氢氧化钙制剂直接或间接对牙髓进行覆盖。
- 6) 粘接操作
依据牙科用牙本质粘接材的使用说明书，进行粘接操作。

7) 充填

从注射器里采取本产品的所需量后，使用器具来充填窝洞并进行造形。

8) 光固化

使用牙科光固化灯（卤素光固化灯：20 秒照射；LED 光固化灯：10 秒照射）进行光照射，使其光固化。窝洞深的，需将其按每次大约2 mm 分开，进行数次充填·光固化。另外如有窝洞表面面积较大的，也要按上述方法分开数次进行光照射，使其光固化。

9) 形态修整和研磨

固化后，按照通常方法进行形态的修整和研磨。

【注意事项】

[使用方法及相关的注意事项]

- 1) 在使用牙科光固化灯时，医师要避免直视照射光，需使用保护眼镜或遮光板。
- 2) 窝洞深的，需用覆髓材料来对牙髓保护。（但勿使用含丁香酚系的垫底材料）
- 3) 本产品使用后必须将盖子拧紧盖好。
- 4) 本产品不可放置在高温处（如火炉旁、阳光直射处等）。
- 5) 取出放在调拌纸上的本产品，需用遮光罩遮光。

[使用注意]

- 1) 本产品不可用于【适用范围】所记载的用途之外。
- 2) 非牙科从业者不可使用本产品。

[重要的基本注意]

- 1) 在本产品的使用中，若出现发湿疹、红肿、溃疡、瘙痒、发麻等过敏症的患者，请停止使用并速就医。
- 2) 在本产品的使用中，若出现发湿疹、红肿、溃疡、瘙痒、发麻等过敏症的操作者，请停止使用并速就医。
- 3) 为防止与本产品接触引起的过敏症，请执行戴医疗用（齿科用）手套及护眼罩等防护措施。另外，如有附着在口腔软组织或皮肤上，应立即用酒精棉擦拭后，并用大量流水清洗。虽然戴医疗用（齿科用）手套能防止直接接触本产品，但据悉也有部分单体成分在短时间内能渗透进入，因此当附着上本产品后应迅速将手套丢弃，并用流水充分清洗。
- 4) 本产品万一进入了眼中时，请立即用大量流水清洗后，并接受眼科医生的诊治。

【贮存方法】

- 1) 本产品需避免高温、潮湿、阳光直射及火源等，保存在室温（1～30℃）的暗处。
- 2) 避免非牙科从业者接触到本产品，请妥善保存及管理。

【生产日期】

见包装

【使用期限】

有效期：3 年

本产品使用至包装、容器上所记载的使用期限(※)为止。

※(例 ☒ YYYY-MM-DD→表示使用期限至YYYY年MM月DD日)

【注册人/生产企业】

名称 株式会社 松风
住所 日本京都府京都市东山区福稻上高松町11番地
生产地址 日本京都府京都市东山区福稻上高松町11番地
电话 +81-75-561-1112

【代理人/售后服务单位】

名称 松风齿科器材贸易（上海）有限公司
住所 上海市松江区佘山工业区吉业路645号1幢1-3层
电话 021-5779 6980
传真 021-5779 6981

【注册证编号/产品技术要求编号】

国械注进20153171662