

聚羧酸锌水门汀

72590

【产品名称】

聚羧酸锌水门汀
ハイボンドカルボセメント

【型号、规格】

套装：粉 60 克、液 40 克；粉 125 克、液 70 克；
单品：粉 60 克、125 克；液 40 克，70 克

【适用范围】

该产品用于金属冠、桥、嵌体和正畸托槽直接与预备好的牙面粘接。
(不能直接用于近髓或者暴露的牙髓)

【结构及组成】

该产品由粉末及液体两部分组成。其中粉末由氧化锌、氧化镁、次硝酸铋、丹宁酸、氟化锌、氟化锶组成。液体由聚丙烯酸、酒石酸、蒸馏水组成。

【禁忌症】

对本品或聚羧酸盐水门汀有湿疹、皮炎等过敏史的患者或操作者请勿使用。

【使用说明】

- 粉液的比例（粉 / 液为 2.2g/1.0g）
1 平匙的粉末加 3 滴液体。
- 调和
在调拌纸板或玻璃板上量取粉末和液体，将粉末分为两等份，先在液体中加入 1/2 粉末，再使用调拌刀调拌 15 ～ 20 秒后，将剩余的粉末加入并调拌均匀。

调和温度条件	23±1℃
调和时间	60 秒以内
工作时间	3 分钟
固化时间	4 分钟

- 粘接
将修复体及牙质的粘接部位清洁、干燥后，按照常规方法用调和好的水门汀进行粘接。

【注意事项】

[使用方法及相关的注意事项]

- 请注意室温对工作时间的影响，当室温高于 23℃时工作时间会变短，当室温低于 23℃时工作时间又会变长。
- 请使用附属量匙刮平量取所需粉末。
- 将容器颠倒去除气泡后再滴下所需液体。
- 为准确地量取液体，请用湿棉球擦去容器瓶口的多余液体。
- 使用后请立即密封粉末及液体的容器。特别对粉末要注意防潮。
- 因粉液的计量误差和室温的差别，可能导致粘稠度发生改变，因此调拌时需进行粘稠度的调整。
- 请在调拌物的光泽尚未消失前使用。
- 避免在调拌过程中追加液体，否则会导致材料性能劣化。
- 修复体上多余的水门汀，需在固化前用湿纱布迅速去除。
- 在露牙髓或近髓的病例中，请用氢氧化钙制剂进行牙髓保护。

[使用注意事项]

- 本品仅适用于【适用范围】所记载的用途。
- 本品仅供牙科专业人员操作使用。

[重要的基本注意事项]

- 本品使用中，若患者或操作者出现湿疹、皮炎等过敏症，请停止使用并速就医。
- 请注意不要将液体或调和物附着在口腔软组织、皮肤上或弄入眼中。如有附着，应立即用酒精棉擦拭后，并用大量流水清洗。万一进入了眼中，应立即用大量流水清洗后，接受眼科医生的诊治。

【贮存方法】

- 本品需避免高温、潮湿、阳光直射，贮存在室温（1 ～ 30℃）下。
- 避免非牙科专业人员接触本产品，请妥善保管及管理。

【生产日期】

见包装

【使用期限】

有效期：4 年
本品的使用期限见包装所示。
(☞ YYYY-MM-DD →表示使用期限至 YYYY 年 MM 月 DD 日)

【注册人 / 生产企业】

名称 株式会社 松风
住所 日本京都府京都市东山区福稻上高松町 11 番地
生产地址 日本京都府京都市东山区福稻上高松町 11 番地
电话 +81-75-561-1112

【代理人 / 售后服务单位】

名称 松风齿科器材贸易（上海）有限公司
住所 上海市松江区佘山工业区吉业路 645 号 1 幢 1-3 层
电话 021-5779 6980
传真 021-5779 6981

【注册证编号 / 产品技术要求编号】

国械注进 20163172243