

树脂加强型玻璃离子水门汀

72613

【产品名称】

树脂加强型玻璃离子水门汀

【型号、规格】

型号	HY-BOND RESIGLASS
规格	粉 15g、液 8.6ml (10g)

【适用范围】

牙体组织与金属、瓷和树脂制作的各类修复体之间的粘接。

【结构及组成】

产品主要成分：粉：碳氟化铝硅酸盐玻璃、丹宁酸、氟化锌、氟化锶、氧化锌、维生素 C、过硫酸钾、氢化硅、黄色氧化铁、三氧化二铁。液：精制水、聚丙烯酸、二甲基丙烯酸二甘醇酯、二甲基丙烯酸甘醇聚酯、酒石酸、对苯二酚甲基醚、羟甲基苯丁基。其中的聚丙烯酸为树脂加强成分。

【使用说明】

- 1) 去除临时性材料。
彻底去除临时性封闭剂或水门汀，用水清洗并且干燥。
- 2) 盖髓
如果窝洞较深时，先用盖髓剂盖髓（如氢氧化钙等），不要使用含有丁香酚的垫底材料。
- 3) 修复体的准备
清洁表面，备用。
- 4) 取出粉液（标准粉液比 1.6g/1.0g）
使用 1 小勺粉配 1 滴液或 1 大勺粉配 2 滴液。
 > 用包装内配的有大小头的量勺取粉（小勺或大勺）
 > 取粉前不要摇晃瓶子。用包装内提供的量勺及挡板能准确的取出一勺的粉（不用反复刮取）。
 > 滴液前将瓶身垂直，取出无气泡的液体。
 > 用湿纱布清洗液体瓶口的固化的液体。
 > 每次取完（粉和液）后立即盖紧瓶盖，特别小心粉剂不要受潮。
- 5) 调拌
在调拌纸上用塑料调刀按照规定比例混合粉和液 20 秒，然后用常规方法放置水门汀。
 工作时间： 3 分 30 秒
 固化时间： 7 分钟
 > 不要使用金属调刀，这样调拌后水门汀会变黑而且会缩短工作时间及固化时间。
- 6) 去除多余水门汀
多余的水门汀达到橡皮状阶段时（时间为放入患者口腔 2 分 30 秒 ~3 分 30 秒），用器械去除多余材料。

【注意事项】

- 1) 使用不含丁香酚的临时性封闭剂或水门汀。
- 2) 请勿将本产品用于已知对本产品、玻璃离子水门汀或丙烯酸单体过敏的患者。
- 3) 已知对本产品、玻璃离子水门汀或丙烯酸单体过敏的操作者请勿使用本产品。
- 4) 如在使用本产品中患者和操作者发生任何炎症或过敏反应，立即停止使用本产品，并就医。
- 5) 避免直接接触口内软组织、皮肤或眼睛。如意外接触口腔软组织或皮肤，立即用酒精棉球擦拭，然后用清水彻底清洗，如触及眼睛，立即用大量清水冲洗，并就医。
- 6) 本产品仅限于牙科专业人员使用。
- 7) 请勿将本产品用于适用范围以外的用途。

【贮存方法】

室温贮存 (1 ~ 30℃)，避免过度潮湿和高温，远离阳光直射和火源。

【生产日期】

见包装

【使用期限】

有效期 :3 年

本材料的使用期限如包装上记载的所示。

 ( YYYY-MM-DD → 表示使用期限至 YYYY 年 MM 月 DD 日)

【注册人 / 生产企业】

名称 株式会社 松风
 住所 日本京都府京都市东山区福稻上高松町 11 号
 生产地址 日本京都府京都市东山区福稻上高松町 11 号
 电话 +81-75-561-1112

【代理人 / 售后服务单位】

名称 松风齿科器材贸易（上海）有限公司
 住所 上海市松江区佘山工业区吉业路 645 号 1 幢 1-3 层
 电话 021-5779 6980
 传真 021-5779 6981

【注册证编号 / 产品技术要求编号】

国械注进 20163170670