

合成树脂牙

200012129

【产品名称】

合成树脂牙

【型号、规格】

Endura 合成树脂牙前牙

型号	大小	上下	左右	部位	色号	规格
HS	3	上颌 下颌	左侧 右侧	中切齿 侧切齿 犬齿	102、104、106、	1 组 (6 齿 / 板)
HT	4				108、109、110、	16 组(96 齿 / 箱)
HO	5				112、114、116、	10 齿 / 盒
HC	6				A1、A2、A3、	20 齿 / 盒
HSS					A3.5、B2、B3	30 齿 / 盒

备注：1 组 (6 齿 / 板) 具体规格：从表格所罗列的型号、大小、上下、色号中选取任意一种组合，此型号对应的一列前牙 (左右中切齿，侧切齿，犬齿一共 6 颗牙)。●16 组 (96 齿 / 箱) 具体规格：从表格所罗列的型号、大小、上下、色号中选取任意一种组合，此型号对应的 16 组整列前牙。●10 齿 / 盒、20 齿 / 盒、30 齿 / 盒具体规格：从表格中所罗列的型号、大小、上下、左右、部位、色号中任意选取一种组合，组成一个规格。此规格的牙分别包装为 10 齿 1 盒，20 齿 1 盒或 30 齿 1 盒，每盒中的 10 齿，20 齿或 30 齿均是相同的。

Endura 合成树脂牙后牙

型号	大小	上下	左右	部位	色号	规格
S M	28	上颌 下颌	左侧 右侧	第一前磨牙	65、66、67、70、 A2、A3、A3.5、 B3	1 组 (8 齿 / 板)
	30			第二前磨牙		12 组(96 齿 / 箱)
	32			第一后磨牙		10 齿 / 盒
				第二后磨牙		20 齿 / 盒
						30 齿 / 盒

备注：1 组 (8 齿 / 板) 具体规格：从表格所罗列的型号、大小、上下、色号中选取任意一种组合，此型号对应的一列后牙 (左右第一前磨牙，第二前磨牙，第一后磨牙，第二后磨牙一共 8 颗牙齿)。●12 组 (96 齿 / 箱) 具体规格：从表格所罗列的型号、大小、上下、色号中选取任意一种组合，此型号对应的 12 组整列后牙。●10 齿 / 盒、20 齿 / 盒、30 齿 / 盒具体规格：从表格中所罗列的型号、大小、上下、左右、部位、色号中任意选取一种组合，组成一个规格。此规格的牙分别包装为 10 齿 1 盒，20 齿 1 盒或 30 齿 1 盒，每盒中的 10 齿，20 齿或 30 齿均是相同的。

Endura ZERO 合成树脂牙后牙

型号	大小	上下	左右	部位	色号	规格
M	28	上颌 下颌	左侧 右侧	第一前磨牙	A3、A3.5	1 组 (8 齿 / 板)
	30			第二前磨牙		12 组(96 齿 / 箱)
	32			第一后磨牙		10 齿 / 盒
				第二后磨牙		20 齿 / 盒
						30 齿 / 盒

备注：1 组 (8 齿 / 板) 具体规格：从表格所罗列的型号、大小、上下、色号中选取任意一种组合，此型号对应的一列后牙 (左右第一前磨牙，第二前磨牙，第一后磨牙，第二后磨牙一共 8 颗牙齿)。●12 组 (96 齿 / 箱) 具体规格：从表格所罗列的型号、大小、上下、色号中选取任意一种组合，此型号对应的 12 组整列后牙。●10 齿 / 盒、20 齿 / 盒、30 齿 / 盒具体规格：从表格中所罗列的型号、大小、上下、左右、部位、色号中任意选取一种组合，组成一个规格。此规格的牙分别包装为 10 齿 1 盒，20 齿 1 盒或 30 齿 1 盒，每盒中的 10 齿，20 齿或 30 齿均是相同的。

【适用范围】

适用于活动可摘义齿修复

【主要结构组成或者成分】

本产品是三层构造 (牙釉质、牙本质及齿颈部) 的合成树脂牙。
组成成分: 乙二醇二甲基丙烯酸酯、聚甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸甲酯、聚氨酯丙烯酸酯、二甲基丙烯酸氨基甲酸酯、Urethane triacrylate oligomer、有机填料、微粒子硅酸、荧光材料、紫外线吸收材料、白色染色材料、红色染色材料、黄色染色材料、黑色染色材料。

【禁忌症】

使用本产品而导致出现发疹、皮炎等过敏症状的患者或操作者，请立即中止使用并速就医。

【使用说明】

使用本产品按照常规方法进行局部、全口义齿的制作。

【注意事项】

[使用方法及相关的注意事项]

- 1) 该硬质树脂牙应避免使用强碱性的石膏溶解液，否则有可能会变色。
- 2) 制作蜡义齿时，注意不要将人工牙部分接触到火焰。
- 3) 本产品若用于加热固化型基托树脂以外的情况时，在使用时必须给它物理支持力。

【使用注意】

- 1) 在对本产品切削、打磨时，为避免粉尘对人体的不利影响，请使用吸尘装置 / 防尘口罩 / 保护眼镜等，防御操作时产生的粉尘。
- 2) 本产品不可用于【适用范围】所记载的用途之外。
- 3) 非牙科从事者不可使用本产品。

【其他注意】

- 1) 请指导患者在使用义齿时需注意以下的一般事项：
 - ① 保持义齿清洁。吃饭后，使用柔软的义齿专用牙刷、轻柔去除食物残渣并进行清洁。建议使用义齿清洁剂等效果更佳。
 - ② 若人工牙部分附着上污垢或菌斑时，请用义齿用牙刷蘸上适宜的牙用研磨剂进行擦刷。

【储存方法】

本产品需贮存在避免高温、多湿及阳光直射的地方。

【生产日期】

见包装

【使用期限】

有效期：10 年

【注册人 / 生产企业】

名称	株式会社滋贺松风
住所	日本滋贺县甲贺市信乐町黄瀬 2296
生产地址	日本滋贺县甲贺市信乐町黄瀬 2296
电话	+81-748-83-0016

【代理人 / 售后服务单位】

名称	松风齿科器材贸易 (上海) 有限公司
住所	上海市松江区佘山工业区吉业路 645 号 1 幢 1-3 层
电话	021-5779 6980
传真	021-5779 6981

【注册证编号 / 产品技术要求编号】

国械注进 20143176028

前牙尺寸表

前牙型号 \ 上下牙的尺寸		中切牙的长度 (不包括颈圈) mm		上牙 中切牙的宽度 mm	上下牙 6 个前牙的宽度 (平面) mm		上下牙 6 个前牙的宽度 (弧面) mm	
		上	下		上	下	上	下
HS 方型	3	10.0	9.0	7.5	41.0	33.0	46.5	36.5
	4	10.5	9.5	8.0	44.5	34.5	50.0	38.0
	5	11.0	10.0	8.5	47.5	37.0	53.0	41.0
	6	12.0	10.5	9.0	50.0	40.0	56.5	44.0
HT 尖型	3	9.5	8.5	7.5	39.0	31.5	43.0	34.5
	4	10.5	9.0	8.0	41.5	32.5	46.0	35.5
	5	11.0	10.0	8.5	44.5	34.5	50.0	38.0
	6	11.5	10.5	9.0	47.0	37.0	55.0	41.0
HO 卵圆型	3	9.5	8.5	7.5	40.5	30.5	45.5	33.5
	4	10.0	9.0	8.0	42.0	32.5	47.0	36.0
	5	10.5	9.5	8.5	45.0	35.0	51.5	38.5
	6	11.0	10.5	9.0	47.5	37.0	54.5	40.5
HSS 短方型	3	9.0	8.0	7.5	39.5	31.5	45.0	36.0
	4	9.5	8.5	8.0	42.0	33.0	48.0	38.0
	5	10.0	9.0	8.5	44.0	35.5	50.0	40.5
	6	11.0	10.0	9.0	47.5	38.0	54.0	43.5
HC 混合型	3	9.5	8.5	7.5	40.0	33.0	45.5	37.0
	4	10.5	9.0	8.0	43.5	34.5	49.5	38.5
	5	11.0	9.5	8.5	45.5	36.0	51.5	41.0
	6	11.5	10.0	9.0	48.0	38.5	54.5	43.5

后牙尺寸表

后牙型号 \ 上下牙的尺寸		4 个后牙的宽度 mm		第一前磨牙的长度 (不包括颈圈) mm	
		上牙	下牙	上	下
S	28	28.0	30.5	7.5	7.5
	30	30.0	32.5	8.0	8.0
	32	32.0	34.5	9.0	9.0
M	28	28.0	30.5	8.5	8.5
	30	30.0	32.5	9.0	9.0
	32	32.0	34.5	10.0	10.0

各种前后牙的颜色匹配表

后牙色号	相匹配的前牙色号
A2	A1、A2
A3	A3
A3.5	A3.5
B3	B2、B3
65	102、104、106、110
66	112
67	108、109
70	114、116